
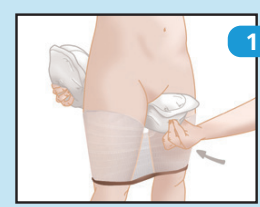


Hoe legt u onze producten het beste aan?


Bij een staande patiënt

MoliForm

Vouw de MoliForm open en trek hem voorzichtig aan beide zijden uit. Het kussen vormt zich nu vanzelf.

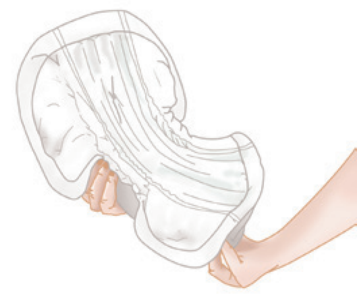


1 Breng de MoliForm van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt. Vouw het netbroekje omlaag.

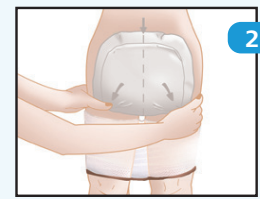

2 Plaats de MoliForm zorgvuldig midden op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.




3 Houd met één hand de MoliForm aan de voorzijde vast en trek met de andere hand het netbroekje MoliPants omhoog.

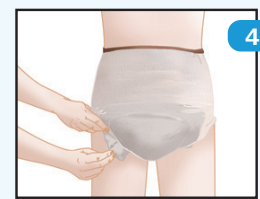


4 Zorg dat de MoliForm goed aansluit op het lichaam. Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliForm wegtrekken.


Bij een liggende patiënt

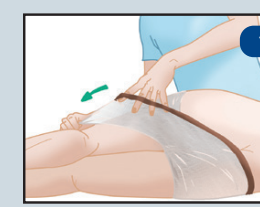


1 Leg de patiënt op de zij. Pak één zijde van het netbroekje MoliPants en breng die omlaag richting knie.

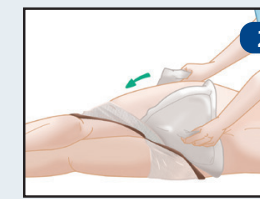


2 Breng de MoliForm van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt.

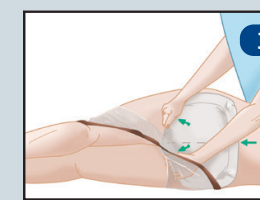

3 Plaats de MoliForm zorgvuldig op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.

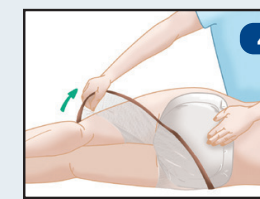

4 Pak de MoliPants bij de omlaag getrokken zijde vast en breng die omhoog.

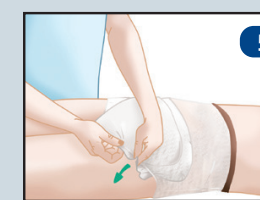

5 Draai de patiënt weer op de rug. Zorg dat de MoliForm goed aansluit op het lichaam.

Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliForm wegtrekken.