

# Gebruiksaanwijzing VacuSan 1.0



## ➤ STAP 1

**Trap het voetpedaal in**, om de sealbar van de VacuSan te openen.



## ➤ STAP 2

**Plaats de afvalzak tactisch tussen de rode hoekjes en laat het voetpedaal los.**

De afvalzak klemt zich nu tussen de sealbar.



## ➤ STAP 3

**Druk de bovenste groene knop kort in, om het vacumeerproces te starten.**

De knop zal hierbij groen oplichten.

*>Vacumeren kan onbeheerd, hier hoeft je niet bij te blijven!*



## ➤ STAP 4

**Verwijder de gevacumeerde afvalzak.**

De afvalzak is luchtdicht gesloten met een dubbele seal-naad voor veilige opslag.