

Gebruiksaanwijzing VacuSan 2.0



➤ STAP 1

Plaats je voet onder de rode laser-stip.

De VacuSan opent zich automatisch.




➤ STAP 2

Plaats het uiteinde van de afvalzak tactisch tussen de sealbar. Hoekjes in de hoekjes. Niet te ver, niet te ver terug.



➤ STAP 3

Verwijder je voet onder de rode laser-stip. Houd de afvalzak vast, totdat de VacuSan zich gesloten heeft. De VacuSan zal de afvalzak nu automatisch vacumeren. *>Vacumeren kan onbeheerd, hier hoeft je niet bij te blijven!*

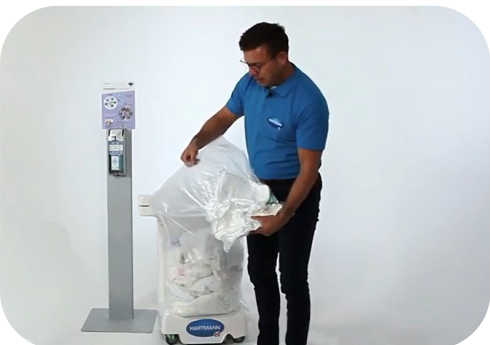

➤ STAP 4

Verwijder de gevacumeerde afvalzak. De afvalzak is luchtdicht gesloten met een dubbele seal-naad voor veilige opslag.