


# Assortimentsoverzicht continentiezorg

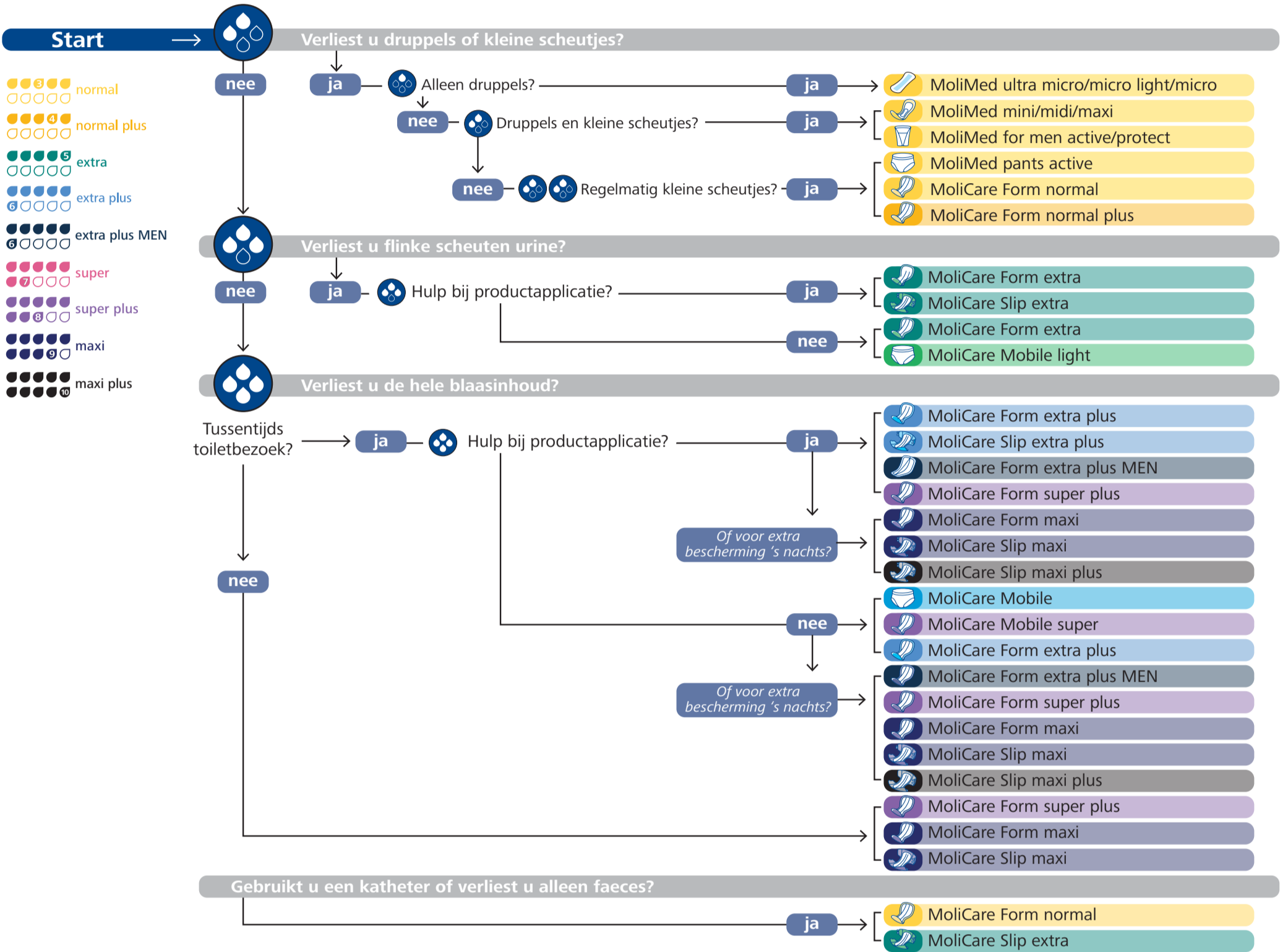

## Hoe legt u onze producten het beste aan?

### Bij een staande patiënt

#### MoliCare Form

Vouw de MoliCare Form open en trek hem voorzichtig aan beide zijden uit. Het kussen vormt zich nu vanzelf.



- Breng de MoliCare Form van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt. Vouw het netbroekje omlaag.
- Plaats de MoliCare Form zorgvuldig midden op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Houd met één hand de MoliCare Form aan de voorzijde vast en trek met de andere hand het netbroekje MoliCare Fixpants omhoog.
- Zorg dat de MoliCare Form goed aansluit op het lichaam. Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Form wegtrekken.

### Bij een liggende patiënt

- Leg de patiënt op de zij. Pak één zijde van het netbroekje MoliCare Fixpants en breng die omlaag richting knie.
- Breng de MoliCare Form van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt.
- Plaats de MoliCare Form zorgvuldig op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Pak de MoliCare Fixpants bij de omlaag getrokken zijde vast en breng die omhoog.
- Draai de patiënt weer op de rug. Zorg dat de MoliCare Form goed aansluit op het lichaam. Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Form wegtrekken.

### Bij een staande patiënt

#### MoliCare Slip

Vouw de MoliCare open en trek hem voorzichtig aan beide zijden uit. Het kussen vormt zich nu vanzelf.



Correct aangelegd



- Breng de MoliCare Slip van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt.
- Plaats de MoliCare Slip goed in het midden op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen aan de achterzijde het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Houd met één hand de MoliCare Slip aan de voorzijde vast en breng met de andere hand het nonwoven zijvlak richting de heup.
- Trek de onderste plakstrips licht uit en plaats beide schuin naar boven op het product. Trek vervolgens de bovenste plakstrips licht uit ze plaats ze schuin naar onder. (U kunt ook eerst de bovenste plakstrips vastplakken en vervolgens de onderste).
- Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Slip wegtrekken.

### Bij een liggende patiënt

- Leg de patiënt op de zij. Breng de MoliCare Slip van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt.
- Plaats de MoliCare Slip goed in het midden op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen aan de achterzijde het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Draai de patiënt weer op de rug. Breng met uw handen het nonwoven zijvlak richting de heup.
- Trek de onderste plakstrips licht uit en plaats beide schuin naar boven op het product. Trek vervolgens de bovenste plakstrips licht uit ze plaats ze schuin naar onder. (U kunt ook eerst de bovenste plakstrips vastplakken en vervolgens de onderste).
- Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Slip wegtrekken.

